

Sacaleche eléctrico doble

ES Instrucciones de uso



¡Bienvenida a la familia Ameda!

Será un placer ayudarle con sus objetivos de lactancia materna mientras esté dando el pecho a su bebé. Con el sacaleche de Ameda y el set de recogida de leche HygieniKit®, podrá extraer y conservar la leche de forma segura y efectiva.






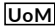







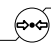



Ameda HygieniKit es un sistema cerrado que incluye un diafragma que mantiene el aire del extractor y del conducto alejado de las piezas del extractor en contacto con la leche para mantener seco el conducto. El diafragma impide que la leche entre en el conducto.

Si tiene alguna duda sobre el set HygieniKit o el sacaleche Ameda, contamos con un equipo de atención al cliente certificado ParentCare para ayudarle. Si llama, procure tener a mano el sacaleche y las piezas. Puede contactar con ParentCare por teléfono en horario comercial, los días laborables: **1.866.992.6332**. Consulte si hay algún cambio en www.ameda.com.

Si quiere obtener más información sobre lactancia materna, extracción de leche o los productos Ameda, visite www.ameda.com. Para más información o consultas en otros países, busque en la lista de distribuidores fuera de Estados Unidos en www.ameda.com.

1.	AVISOS Y PRECAUCIONES	4
2.	USO PREVISTO	6
3.	CONTRAINDICACIONES	6
4.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	7
5.	PREPARACIÓN	8
	5.1 Antes del primer uso: Limpieza del set HygieniKit	8
	5.2 Montaje del set de recogida de leche HygieniKit	9
6.	INSPECCIÓN PREVIA A LA EXTRACCIÓN	11
7.	INSTRUCCIONES DE EMPLEO	11
	7.1 Conexión a la fuente de alimentación	11
	7.2 Control mediante botones	12
	7.3 Modos e iconos LCD	12
	7.4 Comienzo de la extracción	13
	7.5 Cómo se ajusta el embudo	15
	7.6 Pautas para el almacenamiento de leche materna	15
8.	LIMPIEZA DEL SET HYGIENIKIT	16
9.	MANTENIMIENTO	17
	9.1 Control de la válvula del sacaleche	17
	9.2 Almacenamiento y transporte	17
10.	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	17
11.	GARANTÍA	19
12.	DATOS TÉCNICOS	20
	12.1 Especificaciones	20
	12.2 Compatibilidad electromagnética	21
	12.3 Eliminación del producto	24
13.	CONDICIONES DE EMPLEO Y DE ALMACENAMIENTO	24
14.	VIAJES O USO EN OTROS PAÍSES	25
15.	REPUESTOS Y ACCESORIOS AMEDA	25

Significado de los símbolos

	Advertencia		Proteger de la luz solar		Fabricante
	Precaución		Mantener seco		Unidad de medida
	Importante		Rango de temperatura		Aparato eléctrico de clase II (doble aislamiento)
	Lavarse las manos		Rango de humedad		Pieza aplicada de tipo BF
	Sí		Determina el rango de presión atmosférica		IP22 Clasificación de entrada de partículas sólidas/líquido
	Frágil, manipular con cuidado				Residuos de equipos eléctricos y electrónicos

*No todos los símbolos que se muestran aparecen en el documento

1. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PRECAUCIONES IMPORTANTES




Al utilizar productos eléctricos, sobre todo en presencia de niños, se deben seguir siempre estas medidas de seguridad básicas.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

PELIGRO: Para reducir el riesgo de electrocución:

- Desconecte siempre el producto eléctrico inmediatamente después del uso.
- **NO** utilice el producto si se está dando un baño, una ducha o sumergida en el agua.
- **NO** coloque ni conserve el producto en un lugar donde pueda caer en una bañera, ducha, lavabo o piscina.
- **NO** sumerja ni arroje el producto en agua u otro líquido.
- **NO** intente coger el producto eléctrico si ha caído dentro del agua. Desconéctelo inmediatamente del enchufe eléctrico.

El símbolo de **ADVERTENCIA** identifica instrucciones de seguridad importantes que, si no se siguen, pueden ocasionar lesiones o daños en el sacaleche. Cuando van acompañados de estas palabras, los símbolos de aviso significan lo siguiente:

	ADVERTENCIA Puede causar lesiones graves o la muerte.
	PRECAUCIÓN Puede causar lesiones leves.
	IMPORTANTE Puede causar daños materiales.



ADVERTENCIA: Para evitar el peligro de incendio o electrocución, y lesiones o quemaduras graves:

- **NUNCA** deje el producto desatendido cuando esté conectado a una toma eléctrica.
- Si el producto se utiliza cerca de niños o personas con discapacidades, hay que proceder con especial atención.
- Utilice este producto **SOLAMENTE** para la finalidad prevista, como se describe en este manual.
- **NO** utilice piezas que no sean las recomendadas por el fabricante.
- Antes de cada uso, compruebe siempre si hay daños o cables a la vista en el adaptador de corriente. Si detecta daños o cables a la vista, no utilice el adaptador de corriente y llame al servicio de atención al cliente de Ameda ParentCare: **1.866.992.6332**.
- **NUNCA** ponga en funcionamiento un producto eléctrico en estos casos: daños en un cable o un enchufe; funcionamiento incorrecto; caída, daños o producto mojado.
- Evite que los cables entren en contacto con superficies calientes.
- **NO** instale pilas del revés, ni las recargue. Asimismo, no las tire al fuego ni las mezcle con pilas de otro tipo. Las pilas podrían explotar o tener fugas y causar lesiones. Sustituya todas las pilas al mismo tiempo.
- **NUNCA** utilice este producto mientras duerme o si tiene sueño.
- **NUNCA** introduzca ni deje caer ningún objeto por las aberturas o el conducto.

Condiciones ambientales que afectan al uso

- **NO** utilice este producto en exteriores con el cable eléctrico.
- **NO** ponga en funcionamiento el producto si se están utilizando pulverizadores de aerosol u oxígeno.



ADVERTENCIA: Para evitar riesgos para la salud y reducir el riesgo de lesiones:

Este producto es un artículo sanitario y está previsto para el uso personal. No deben compartir este producto varias usuarias, ni se debe revender ni entregar a otra persona. La extracción no impide la transmisión de sustancias o infecciones transmitidas al bebé a través de la leche materna.

Nota: No utilice el producto si está dañado. Utilice este producto solo para la finalidad prevista, tal y como se describe en este manual.

- **NO** utilice el extractor mientras conduce.
- La extracción puede provocar el parto, **NO** utilice este producto si está embarazada, a menos que lo autorice su especialista en lactancia o un profesional sanitario.
- Antes del primer uso y después de cada uso, limpie todas las piezas (embudo, diafragma, válvula y botella) que entren en contacto con el pecho y con la leche materna.
- **NO** utilice más componentes y accesorios que los recomendados por el fabricante.
- **NO** realice modificaciones mecánicas ni eléctricas en la base del extractor.
- Inspeccione todos los componentes de la bomba que sea oportuno antes de cada uso. Compruebe si las piezas están agrietadas, gastadas o con rasguños. **NO** las utilice y contacte inmediatamente con el servicio de atención al cliente de Ameda ParentCare: **1.866.992.6332**.
- **NO** siga con la extracción más de 2 sesiones de extracción consecutiva si no está obteniendo resultados.
- **NO** caliente ni deshiele leche materna congelada en el microondas ni con agua hirviendo. En el microondas, los líquidos pueden calentarse de forma no uniforme. El microondas y el agua hirviendo pueden provocar quemaduras.
- Si usted es una madre que está infectada con hepatitis B, hepatitis C o el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), bombear leche materna no reducirá ni eliminará el riesgo de transmitir el virus a su bebé a través de la leche materna.
- Si se produce irritación o malestar, suspenda su uso y consulte a un médico.
- Los materiales accesibles pueden provocar reacciones alérgicas.

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO: Mantenga el conducto y los cables fuera del alcance de los niños.

PELIGRO DE ASFIXIA: Contiene piezas pequeñas, **NO** apto para menores de 3 años.



PRECAUCIÓN: Puede causar lesiones leves:

- Si hay pilas en la base del extractor, extráigaslas antes de utilizar el adaptador de corriente.
- **NO** enrolle el cable alrededor del cuerpo del adaptador.
- Utilice **ÚNICAMENTE** el adaptador de corriente alterna recomendado para el sacaleche Ameda Mya Joy.
- **NO** acorte el conducto ni modifique el set sacaleche.
- Compruebe que la tensión del adaptador de corriente es compatible con la fuente de alimentación.
- Conecte el adaptador de corriente alterna en la base del extractor antes de conectarlo al enchufe.
- Desconecte el adaptador de corriente alterna de la corriente eléctrica y extraiga las pilas antes de limpiar el exterior de la base del extractor, y utilice un paño húmedo para la limpieza.
- Evite la presencia de polvo y pelusas, y la exposición directa a la luz del sol, ya que podría dañarse el extractor y reducirse la velocidad y la succión.
- **NO** trate de retirar el embudo del pecho durante la extracción. Apague el extractor con el dedo, rompa el vacío entre el pecho y el embudo y retire el embudo del pecho.
- **SIEMPRE** coloque el extractor sobre una superficie plana y horizontal mientras utilice el producto.
- **NO** cambie las pilas ni abra la tapa del compartimento de las pilas si el extractor está encendido.
- Extraiga las pilas antes de guardar el producto durante mucho tiempo.



IMPORTANTE: Puede ocasionar daños materiales.

- **NO** introduzca el producto en agua ni en producto esterilizante, porque puede ocasionar daños permanentes en el extractor.
- **NO** utilice detergentes o productos de limpieza abrasivos ni antibacterianos al limpiar el extractor o sus piezas.
- Si se congelan botellas de plástico o piezas de plástico del set extractor, pueden volverse quebradizas y romperse en caso de caída.
- **NO** llene las botellas en exceso. Cambie de botellas antes de que rebosen.
- Las botellas y las piezas del set extractor pueden dañarse si el uso es incorrecto, por ejemplo, en caso de caída, apriete excesivo o si se vuelcan.
- Antes de la extracción, inspeccione las botellas o las piezas del set extractor. Deseche la leche si las botellas o alguna pieza del set extractor están dañadas.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

2. USO PREVISTO


El extractor de leche materna Ameda Mya Joy sirve para extraer y recoger leche materna del pecho de una mujer lactante para la alimentación de bebés.

3. CONTRAINDICACIONES

No se conocen contraindicaciones de uso con este producto.

4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ameda Mya Joy y set de recogida de leche HygieniKit

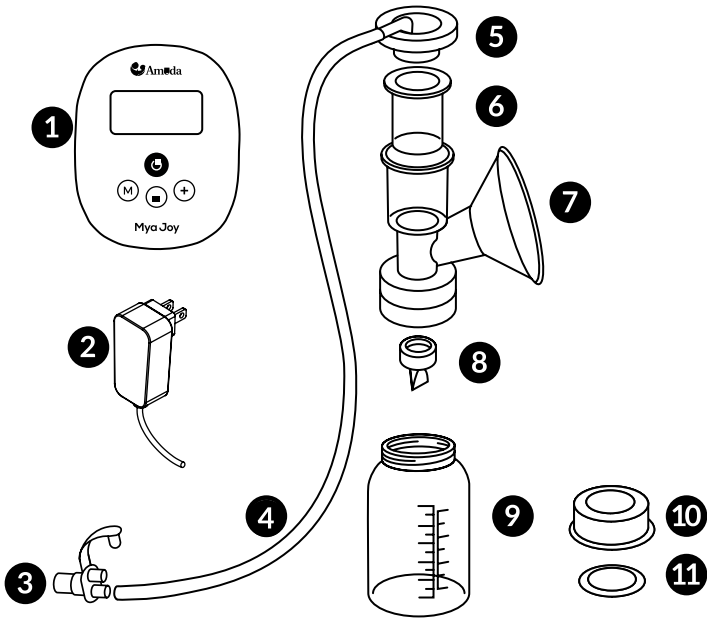

Contenido

1. Unidad de extracción Ameda Joy

2. Adaptador de corriente

Sistema de recogida de leche
Ameda HygieniKit

3. Adaptador del conducto

4. Conducto

5. Tapa del adaptador

6. Diafragma

7. Embudo de lactancia (25,0 mm)

8. Válvula de silicona

9. Botella

10. Tapa anular de bloqueo de la botella

11. Disco de bloqueo de la botella

Las piezas del extractor pueden ser diferentes.


5. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

5.1 Antes del primer uso: Limpieza del HygieniKit

La desinfección es importante para la higiene y sirve para matar organismos vivos, tales como bacterias o virus. Consulte la sección de limpieza y desinfección para la limpieza continua de su dispositivo. Antes del primer uso, a menos que su proveedor de atención médica le indique lo contrario, prepare el producto para su uso de la siguiente manera:

1. Desmonte todas las piezas y límpielas siguiendo las instrucciones de limpieza de la bomba para pechos. Para obtener pautas de limpieza adicionales, consulte el sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades: <https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/healthychildcare/infantfeeding/breastpump.html>
2. **QUITE** la tapa del adaptador del embudo y consulte la descripción del producto de la página 54 para ver la ilustración.
3. **DEJE A UN LADO** la tapa del adaptador, el tubo y el adaptador del tubo; no es necesario que los separe. Estas 3 piezas **NO** necesitan lavarse antes del primer uso o después de cada uso; la leche no entra en contacto directo con estas piezas.

NOTA: Inspeccione el tubo. Si encuentra condensación en el tubo de aire, lávelo y séquelo inmediatamente o reemplace el tubo. Si ve leche materna dentro del tubo o el conector del tubo, no intente lavar, limpiar o esterilizar el tubo o el conector del tubo. En su lugar, comuníquese con Ameda, Inc.

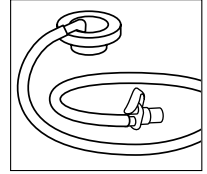

NO lave la tapa del adaptador, el tubo ni el adaptador del tubo.

Separe las piezas restantes, el diafragma, el embudo, la válvula y los biberones de almacenamiento de leche, incluido el anillo de bloqueo y el disco de bloqueo, ya que estas son las piezas que pueden tocar la leche materna una vez que comience a bombear.



LÁVESE BIEN LAS MANOS con agua y jabón antes de tocar la bomba para pechos, el kit y los pechos.



DESINFECCIÓN mediante hervor.

NO permita que las piezas hirviendo entren en contacto con el fondo de la olla. Puede causar daños a las piezas.



ADVERTENCIA: **NO** deje las piezas hirviendo sin vigilancia. Retire las piezas con cuidado del agua hirviendo para evitar que se quemen. El agua hervida y el vapor del agua hervida pueden causar quemaduras graves en la piel, así que tenga cuidado al hervir las piezas en el agua y al sacarlas del agua hirviendo.

ALTERNATIVA AL HERVER:

DESINFECCIÓN en microondas: Siga las instrucciones del fabricante de la bolsa de vapor.



IMPORTANTE: Deje a un lado el tubo, la tapa del adaptador y el adaptador del tubo. Estas piezas **NO** necesitan lavarse.

- Revise las piezas del kit de la bomba para ver si están agrietadas, astilladas, rotas o deformadas antes y después del proceso de desinfección.

Use solo bolsas para microondas específicamente etiquetadas para desinfectar los componentes de la bomba para pechos y consulte la etiqueta de la bolsa para microondas para obtener más instrucciones.



ADVERTENCIA: Tenga precauciones. El mayor riesgo de las bolsas de vapor es la quemadura, por lo que las mamás y los cuidadores deben tener mucho cuidado al sacar la bolsa del microondas.

LIMPIEZA DEL TUBO: Es necesario lavar el tubo solo si hay condensación. Si hay condensación en el tubo, lávelo y séquelo inmediatamente o reemplace el tubo. Si hay leche en el tubo, no intente lavar o limpiar el tubo. En su lugar, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Ameda al 1.866.992.6332.

CÓMO LAVAR EL TUBO:



1. Enjuague el tubo vertiendo agua fría y asegúrese de que el agua fluya a través de todo el tubo de un extremo al otro.
2. Lave el tubo con agua tibia y jabón y enjuague bien.

CÓMO SECAR EL TUBO:


Cuelgue el tubo para que se seque al aire y asegúrese de que el tubo esté completamente seco antes de usarlo.

5.2 Armado del sistema de recolección de leche HygieniKit®


Una vez que las piezas de la bomba estén completamente secas antes de usar, lávese bien las manos y arme el sistema de recolección de leche HygieniKit® (kit de la bomba).

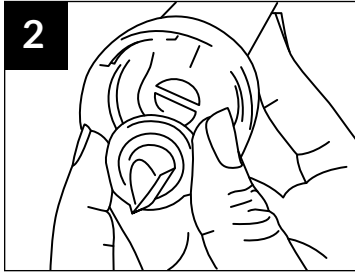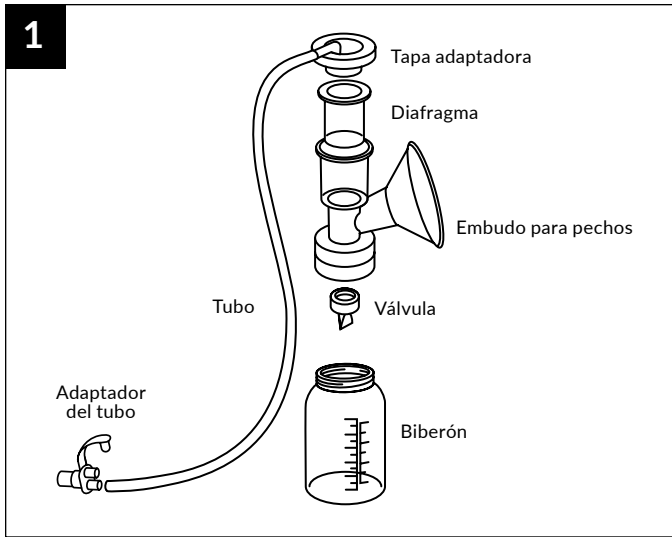


SOSTENGA por el borde o los lados más gruesos de la válvula.

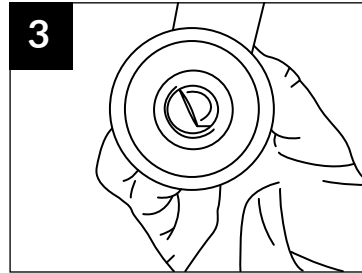

EMPUJE la válvula hacia la parte inferior del embudo.

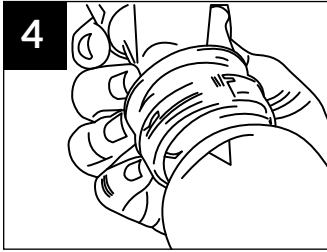


4
CONECTE Y APRIETE el biberón o conecte la bolsa de almacenamiento de leche.

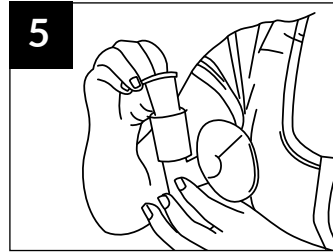

5
INSERTE el diafragma en la parte superior del embudo.


Es importante que el interior del diafragma esté completamente SECO para evitar que se forme humedad en el tubo.

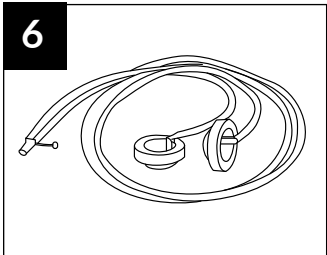


6
CONECTE la(s) tapa(s) del adaptador presionándola(s) en la parte superior del/de los embudo(s) hasta que escuche un chasquido.



7
El tubo aún debe estar **CONECTADO** a la(s) tapa(s) del adaptador y al adaptador del tubo.

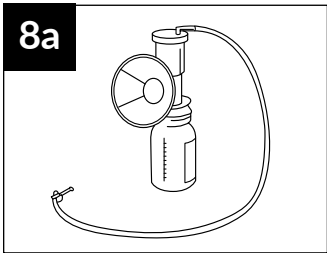

8a
HYGIENIKIT ARMADO para bombeo individual.

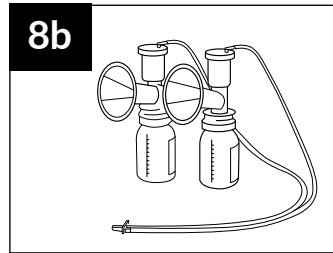

8b
HYGIENIKIT ARMADO para bombeo doble.

Las piezas de la bomba pueden variar.

6. INSPECCIÓN ANTES DE BOMBLEAR




IMPORTANTE: Antes de usar el set HygieniKit y el extractor Ameda Mya Joy, compruebe si las piezas tienen grietas, desgaste o rasguños. Estos daños pueden afectar el funcionamiento del set. Si las piezas están defectuosas y hay que sustituirlas, llame a su distribuidor local o al establecimiento donde haya comprado el extractor. No utilice piezas dañadas. Para obtener una lista de distribuidores en su país, visite www.ameda.com.

7. INSTRUCCIONES DE EMPLEO

7.1 Conexión a la fuente de alimentación

Selección y control de la fuente eléctrica

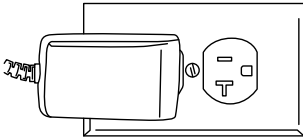

ADAPTADOR DE CORRIENTE ALTERNA



ADVERTENCIA: Utilice **ÚNICAMENTE** el adaptador de corriente alterna recomendado para el extractor Ameda Mya Joy. Los adaptadores de corriente alterna con tomas eléctricas para Australia, Reino Unido, Europa u otros países no están previstos para el uso en EE. UU. ni Canadá.



ADVERTENCIA: Compruebe siempre si hay daños en el adaptador de corriente alterna, como cables torcidos o doblados, a la vista o pelados. Si detecta algún daño, no siga utilizando este producto y llame inmediatamente al servicio de atención al cliente: **1.866.992.6332**.

1. Si hay pilas en la base del extractor, **EXTRAIGA** las pilas antes de utilizar el enchufe del adaptador de corriente alterna.
2. **INTRODUZCA** a presión el extremo pequeño del adaptador de corriente alterna en el lado izquierdo de la base del extractor, tal y como se ve en la imagen.
3. **ENCHUFE** el otro extremo en una toma de corriente alterna.

PILAS




ADVERTENCIA: **NO** introduzca las pilas del revés, ni las recargue, las lance al fuego ni mezcle baterías de tipos diferentes. Las pilas podrían explotar o tener fugas y causar lesiones. Sustituya todas las pilas al mismo tiempo.

1. **ABRA** el compartimento para pilas de la parte inferior de la base del extractor.
2. **INTRODUZCA** cuatro pilas AA nuevas, tal y como se ve en la figura.
3. **CIERRE** el compartimento para pilas.

Aviso de carga de la pila

Cuando las pilas estén a punto de agotarse, la pantalla LCD mostrará el aviso «Lo». Cuando vea este aviso, sustituya todas las pilas o utilice el adaptador de corriente alterna.

CONSEJO: UTILICE unas pilas nuevas de calidad (como Energizer o Duracell) e introdúzcalas según se muestra en la imagen.

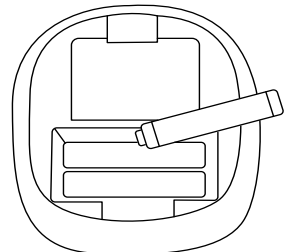

7.2 Control mediante botones


A. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

B. BOTÓN DE SELECCIÓN DE MODO


Permite cambiar entre el modo de estimulación y el de extracción.

C. - / + NIVEL DE VACÍO

Aumenta o reduce la fuerza de succión durante la extracción.

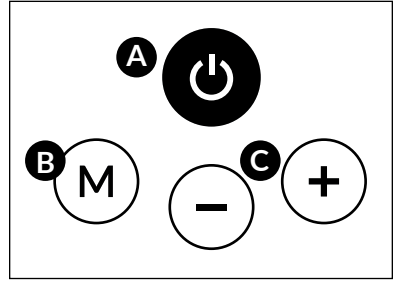

7.3 Modos e iconos LCD

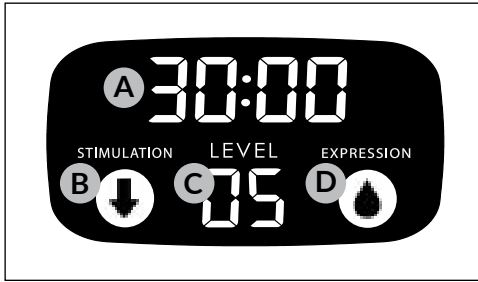

A. PANTALLA DEL TEMPORIZADOR

Supervisa el tiempo de extracción. Se apaga automáticamente después de 45 minutos.

B. MODO DE ESTIMULACIÓN

Reproduce el patrón de succión rápida del bebé, a velocidad alta y succión baja, para que la leche comience a fluir. Este icono desaparece en el modo de extracción.

NOTA: Transcurridos dos minutos, el extractor pasará automáticamente al modo de extracción a menos que se ajuste de otra forma a mano.

C. FUERZA DE SUCCIÓN

Grado de la fuerza de succión durante la extracción. El extractor Ameda Mya Joy tiene modos de succión ajustables en dos etapas:

- Modo de estimulación: Niveles del 1 al 6
- Modo de extracción: Niveles del 1 al 12

Para ajustar el nivel de succión, presione el botón (-) o (+) para reducir y aumentar los niveles.


D. MODO DE EXTRACCIÓN

Reproduce el patrón de succión lenta y constante del bebé, a velocidad lenta y succión elevada, para extraer más leche de forma suave y eficiente. Este icono desaparecerá en el modo de estimulación.

7.4 Comienzo de la extracción


PASO 1: CONECTE EL ADAPTADOR DE CORRIENTE

Introduzca el adaptador de corriente en el lado IZQUIERDO de la base del extractor.

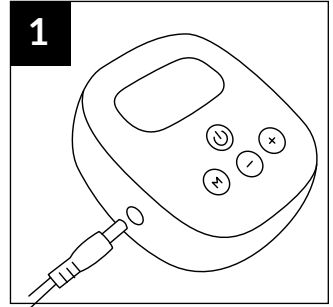


PASO 2: INTRODUZCA EL CONDUCTO


Introduzca el conducto en el adaptador, por el lado DERECHO de la base del extractor. A continuación, gírelo ligeramente hacia la derecha al tiempo que ejerce una presión firme para insertarlo.

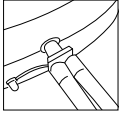

A. Para **EXTRACCIÓN DOBLE**: Conecte los dos tubos con el adaptador del conducto.

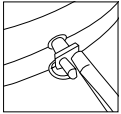


B. Para **EXTRACCIÓN INDIVIDUAL**: Retire un tubo del adaptador del conducto y cierre un lado.

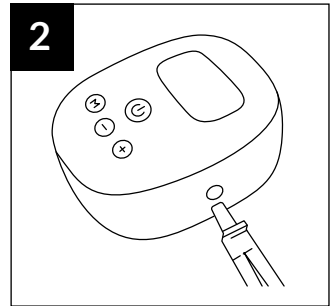

PASO 3: COLOQUE EL EMBUDO SOBRE EL PECHO


Centre el embudo sobre el pecho para crear un vacío.

Compruebe que el embudo se ajusta. Si la extracción resulta incómoda, puede que necesite un embudo de otro tamaño. Consulte el apartado «Cómo se ajusta el embudo».

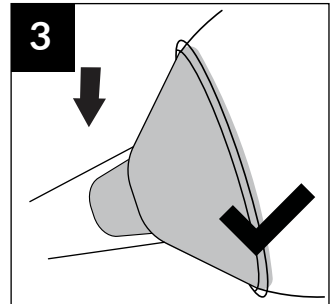

PASO 4: ENCIENDA LA BOMBA

Presione el botón de encendido para encender el dispositivo. Comenzará en el modo de estimulación.

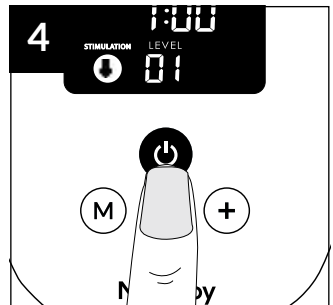


PASO 5: AJUSTE EL NIVEL DE VACÍO

Ajuste el nivel de vacío para la estimulación entre el 1 y el 6, de forma que le resulte cómodo. No seleccione un nivel que le resulte incómodo.


CONSEJO: Comience con una succión suave y vaya subiendo el nivel de forma que le resulte cómodo. Puede que el nivel que le resulta cómodo cambie de un día a otro, en el mismo día o durante la misma sesión de extracción.

NOTA: Al cabo de dos minutos, el extractor pasará automáticamente al modo de extracción, a menos que cambie antes el ajuste.

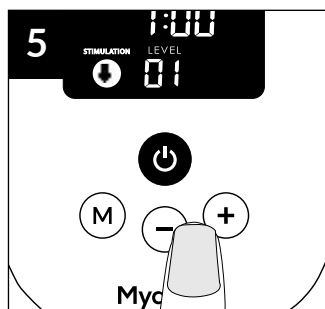

PASO 6: CAMBIE EL MODO


Cuando la leche comience a fluir, pulse el botón de modo para pasar al modo de extracción.

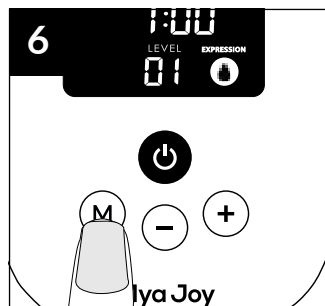

PASO 7: AJUSTE EL NIVEL DE VACÍO

Ajuste el nivel de vacío para la extracción entre el 1 y el 12, según le resulte cómodo. No seleccione un nivel que le resulte incómodo.


CONSEJO: Comience con una succión suave y vaya subiendo el nivel de forma que le resulte cómodo. Puede que el nivel que le resulta cómodo cambie de un día a otro, en el mismo día o durante la misma sesión de extracción.

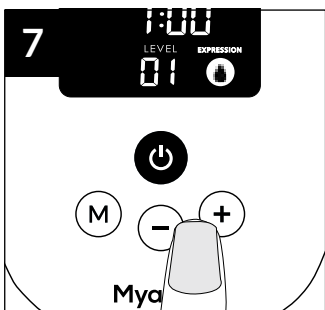

PASO 8: FINALICE LA SESIÓN DE EXTRACCIÓN


Cuando quiera detener la extracción, presione el botón de encendido y, a continuación, retire el set extractor del pecho.

CONSEJO: Cuando termine la extracción, si es necesario, INTRODUZCA un dedo entre el pecho y el embudo, para interrumpir la succión.

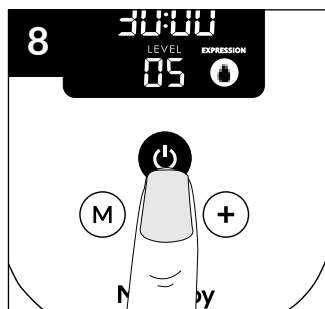


7.5 Cómo ajustar su embudo

Verifique el ajuste del embudo para pechos, si el bombeo le causa molestias, es posible que necesite un embudo para pechos más grande o más pequeño.

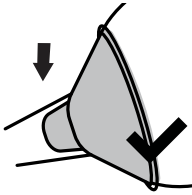


BUEN AJUSTE

Durante el bombeo, su pezón se mueve libremente en el túnel del embudo para pechos. Usted ve que hay espacio alrededor del pezón. No se mete mucha areola hacia adentro del túnel junto con el pezón.

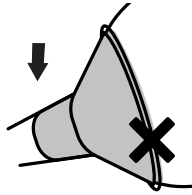

EMBUDO DEMASIADO PEQUEÑO

Durante el bombeo, parte o la totalidad de su pezón se frota contra los costados del túnel del embudo para pechos.

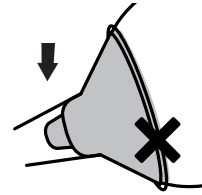

EMBUDO DEMASIADO GRANDE

Durante el bombeo, una mayor parte de la areola se mete hacia adentro del embudo para pechos junto con su pezón. Es posible que su areola se frote contra el costado del túnel del embudo para pechos.

7.6 Pautas para el almacenamiento de leche materna

1. Escriba la fecha en el contenedor de almacenamiento. Incluya el nombre de su hijo si le va a dar la leche a un proveedor de cuidado infantil.
2. Gire suavemente el contenedor para mezclar la parte de la nata de la leche materna que puede subir hasta la parte superior con el resto de la leche. No agite la leche. Esto puede hacer que algunos componentes valiosos de la leche se descompongan.
3. Si es posible, refrigere o enfríe la leche inmediatamente después de bombearla. Puede ponerla en el refrigerador, colocarla en una conservadora o en un bolso térmico, o congelarla en lotes pequeños (de 2 a 4 onzas) para usarla posteriormente. La leche bombeada se mantiene BIEN sin refrigerarla durante un máximo de 4 horas después de bombearla.

	Temperatura ambiente 77 °F (25 °C)	Tiempo en el refrigerador 39 °F (4 °C)	Tiempo en el congelador 0 °F (-18 °C)
Recién extraída o bombeada	Hasta 4 horas	Hasta 4 días	6 meses - Lo mejor 12 meses - Aceptable
*Descongelada, previamente congelada	1 a 2 horas	Hasta 1 día (24 horas)	No volver a congelar
Leche sobrante después de alimentar al bebé (el bebé no terminó el biberón)	Usar dentro de las 2 horas después de que el bebé haya terminado de alimentarse		

***NOTA:** Cuando descongele leche congelada, identifíquela como descongelada cuando esté descongelada por completo (es decir, cuando no haya cristales de hielo presentes). Para determinar los límites de tiempo aceptables para el uso, use el momento en el que la leche está completamente descongelada en lugar del momento en el que la saca del congelador. Estas pautas para almacenar y descongelar leche materna son una recomendación. Consulte con su asesor de lactancia o especialista en amamantamiento para obtener más información.

Estas pautas son para bebés sanos a término y pueden variar para bebés prematuros o enfermos. Consulte con su proveedor de atención médica. Encuentre más recursos sobre lactancia materna en: WICbreastfeeding.fns.usda.gov and www.cdc.gov/breastfeeding/

8. LIMPIEZA DEL HYGIENIKIT®

ANTES DE CADA USO



Lávese las manos con agua y jabón. Inspeccione y arme el kit de la bomba limpio. Si su tubo tiene moho, deséchelo y reemplácelo inmediatamente.


Limpie los diales de la bomba, el interruptor de encendido y la encimera con toallitas desinfectantes, especialmente si usa una bomba compartida.

DESPUÉS DE CADA USO

Almacene la leche de forma segura. Tape el biberón recolector de leche o selle la bolsa recolectora de leche, etiquételo/a con la fecha y la hora y colóquelo/a inmediatamente en un refrigerador, congelador o bolso térmico con bolsas de hielo.

Limpie el área de bombeo, especialmente si usa una bomba compartida. Limpie los diales, el interruptor de encendido y la encimera con toallitas desinfectantes.

Desmunte el tubo de la bomba para pechos y separe todas las piezas que entren en contacto con el pecho o la leche materna.

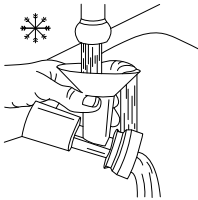


Enjuague las piezas de la bomba para pechos que entren en contacto con el pecho o la leche materna manteniéndolas bajo el agua corriente para eliminar la leche restante.

No coloque las piezas en el fregadero para enjuagarlas.

Limpie las piezas de la bomba que entren en contacto con el pecho o la leche materna lo antes posible después del bombeo.


Puede limpiar las piezas de la bomba en un lavavajillas o **a mano** en un lavabo que se utilice solo para limpiar el kit de la bomba y los artículos de alimentación infantil.

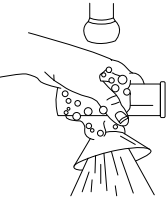

Coloque las piezas de la bomba en un lavabo limpio que se utilice solo para artículos de alimentación infantil. **¡No coloque las piezas de la bomba directamente en el fregadero!**

Agregue jabón y agua caliente al lavabo.

Friegue los artículos con un cepillo limpio que se utilice solo para artículos de alimentación infantil.

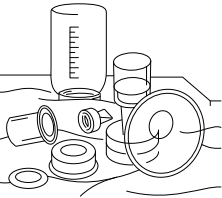

Enjuague manteniendo los artículos bajo el agua corriente o sumergiéndolos en agua dulce en un recipiente separado.

Deje que se sequen bien al aire. Coloque las piezas de la bomba, el lavabo y el cepillo para biberones en un paño de cocina o toalla de papel limpio y sin usar en un área protegida de la suciedad y el polvo. ¡No use un paño de cocina para frotar o secar los artículos con palmaditas!

Limpie el lavabo y el cepillo para biberones. Enjuáguelos bien y déjelos secar al aire después de cada uso. Lávelos a mano o en un lavavajillas al menos cada dos o tres días.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo desinfectar las piezas de su bomba, visite <https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/healthychildcare/infantfeeding.html>



¡IMPORTANTE! Los embudos y los contenedores de almacenamiento de leche también se pueden lavar en la rejilla superior de un lavavajillas doméstico estándar. **NO** utilice disolventes ni abrasivos. Deje secar al aire sobre una superficie limpia.

Limpieza de la bomba: apague la bomba para pechos. Desenchufe la bomba de la fuente de alimentación; limpie la bomba con un paño limpio y húmedo y séquela con una toalla limpia.

9. MANTENIMIENTO

La base del extractor no requiere más servicio ni mantenimiento que el cambio de pilas, en su caso.

9.1 Revisión de la válvula y el diafragma de la bomba para pechos



Inspeccione las válvulas y los diafragmas para ver si tienen roturas o agujeros. Reemplace las válvulas y diafragmas dañados antes de bombear. Lave las válvulas y los diafragmas según lo indicado en la sección de limpieza. No inserte un cepillo para biberones o algo similar en las válvulas. Recomendamos reemplazar las válvulas y los diafragmas aproximadamente cada 8 a 12 semanas, pero esto puede variar según la limpieza y el uso.

9.2 Almacenamiento y transporte

Desconecte el set HygieniKit y el adaptador de corriente del extractor antes de transportar o guardar el producto. Para almacenar el producto, siga las recomendaciones ambientales de este manual. Extraiga las pilas antes de guardar el producto durante mucho tiempo. Al transportar el producto, manéjelo con cuidado.

10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FLUJO DE LECHE LENTO, DESIGUAL O SIN SUCCIÓN

COMPRUEBE LAS VÁLVULAS Y LOS DIAFRAGMAS

Compruebe si las válvulas y los diafragmas tienen agujeros o rasguños. Antes de la extracción, sustituya las válvulas y los diafragmas que pudieran estar dañadas. Lave las válvulas y los diafragmas siguiendo las instrucciones del apartado de este manual sobre la limpieza. No introduzca un cepillo para botellas ni ningún artificio similar en las válvulas. Se recomienda sustituir las válvulas y los diafragmas aproximadamente cada 8-12 semanas, pero puede variar en función de la limpieza y el uso.

COMPRUEBE LAS CONEXIONES

Compruebe que el montaje es correcto y que los puntos de conexión están firmemente sujetos.

- Adaptador del conducto con el puerto del conducto
- Adaptador del conducto con el conducto

Compruebe que la tapa del adaptador está sujeta con el embudo de lactancia. Puede ser práctico retirar la tapa del adaptador y volverla a conectar al embudo de lactancia.

COMPRUEBE LOS DIAFRAGMAS Y EL EMBUDO O LA BOTELLA

Compruebe si los diafragmas tienen agujeros o rasguños. Antes de la extracción, sustituya los diafragmas que pudieran estar dañados.

Compruebe si los embudos, la tapa del adaptador o las botellas tienen mellas, grietas, roturas u otros daños. Antes de la extracción, sustituya los embudos, tapones y botellas que pudieran estar dañados.

COMPRUEBE EL AJUSTE DEL EMBUDO DE LACTANCIA

- Ajuste correcto: El pezón se mueve con libertad en el túnel del embudo.
- Pequeño: El pezón roza con el túnel del embudo.
- Grande: La areola es absorbida al interior del túnel del embudo.

Si tiene más preguntas o algún otro problema, llame al servicio de atención al cliente de Ameda ParentCare: 1.866.992.6332.

<p>SE OYE UN SILBIDO O HAY UNA FUGA DE AIRE</p>	<p>COMPRUEBE LAS VÁLVULAS Y LOS DIAFRAGMAS Compruebe si las válvulas y los diafragmas tienen agujeros o rasguños. Antes de la extracción, sustituya las válvulas y los diafragmas que pudieran estar dañadas. Lave las válvulas y los diafragmas siguiendo las instrucciones del apartado de este manual sobre la limpieza. No introduzca un cepillo para botellas ni ningún artilugio similar en las válvulas. Se recomienda sustituir las válvulas aproximadamente cada 8-12 semanas, pero puede variar en función de la limpieza y el uso.</p> <p>COMPRUEBE LAS CONEXIONES Compruebe que el montaje es correcto y que los puntos de conexión están firmemente sujetos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptador del conducto con el puerto del conducto • Adaptador del conducto con el conducto <p>Compruebe que la tapa del adaptador está sujeta con el embudo de lactancia. Puede ser práctico retirar la tapa del adaptador y volverla a conectar al embudo de lactancia.</p>
<p>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</p>	<p>ADAPTADOR DE CORRIENTE ALTERNA El extractor Ameda Mya Joy está optimizado para el uso con adaptador de corriente alterna. Compruebe que el adaptador de corriente alterna está totalmente introducido en el lateral de la base del extractor. Compruebe que no hay ninguna pila dentro de la base del extractor. Recuerde girar la rueda de succión hacia arriba, para activar la bomba. Pruebe el extractor en otro enchufe.</p> <p>PILAS AA Compruebe que las pilas están bien introducidas en el interior del compartimento para pilas de la base del extractor, tal y como se ve en la figura. Utilice unas pilas nuevas de calidad (como Energizer o Duracell). Si el adaptador de corriente alterna está conectado en el lateral de la base del extractor, no utilice pilas. Si el problema persiste, puede comprobar que las pilas funcionan con otro dispositivo.</p>
<p>Aviso «Lo» en la pantalla LCD</p>	<p>Cuando las pilas AA estén a punto de agotarse, la pantalla LCD mostrará el aviso «Lo». Cuando vea este aviso, sustituya todas las pilas o utilice el adaptador de corriente alterna.</p>
<p>AVISO «ERR» en la pantalla LCD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el adaptador de corriente tiene la clasificación eléctrica correcta (que es un adaptador de corriente aprobado por Ameda). • Sustituya el adaptador de corriente. • Contacte con Ameda: 1.866.992.6332

DECLARACIÓN FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de los reglamentos de la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU. (Federal Communications Commission, FCC). El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Precaución: Los cambios o las modificaciones que se realicen en el dispositivo que no estén aprobados expresamente por invalidar la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.

Nota:

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estas condiciones tienen por objeto ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en viviendas. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no ocurrirán interferencias en algunas instalaciones. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Cambiar la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre equipo y receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito distinto al del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto para obtener ayuda.

11. GARANTÍA

LA GARANTÍA AMEDA NO ES TRANSFERIBLE ENTRE PERSONAS. EL EXTRACTOR ELÉCTRICO MYA JOY ELECTRIC DE AMEDA (EL «PRODUCTO») TIENE GARANTÍA PARA EL USUARIO ORIGINAL ÚNICAMENTE, YA SEA UNA PERSONA O UNA INSTITUCIÓN («PRIMER USUARIO»).

A partir de la fecha de compra de este Producto por parte del Primer usuario, Ameda Company, Inc. («Ameda») garantiza el Producto al Primer usuario contra defectos del material o de la mano de obra durante un período de un año para el mecanismo de la bomba y un periodo de 90 días en para otros componentes de la bomba, excepto para las válvulas de la bomba de extracción. La única obligación de Ameda bajo esta garantía limitada será reparar o reemplazar, a su entera discreción, cualquier Producto que Ameda determine como defectuoso y que se confirme que está cubierto por esta garantía limitada expresa. La reparación o el reemplazo bajo esta garantía limitada es el único y exclusivo recurso para el Primer usuario.

PARA OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA, SE DEBERÁ PRESENTAR COMPROBANTE DE COMPRA EN LA FORMA DE UNA FACTURA RECIBIDA O UN DOCUMENTO DE VENTA QUE PRUEBE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA. Esta garantía limitada es emitida por Ameda ÚNICAMENTE al Primer usuario y no es asignable ni transferible. Para obtener servicios bajo garantía póngase en contacto con Ameda: 1.866.992.6332.

POR LA PRESENTE SE NIEGA RESPONSABILIDAD RESPECTO A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DEL PRODUCTO, SALVO HASTA DONDE LO PROHÍBAN LAS LEYES CORRESPONDIENTES. AMEDA NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSIGUIENTE, ESPECIAL NI PUNITIVO DE TIPO ALGUNO POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA SOBRE EL PRODUCTO NI DE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA POR IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY. SALVO LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ANTERIORMENTE ESTIPULADA, NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS SOBRE ESTE PRODUCTO, Y POR LA PRESENTE SE DESLINDA RESPONSABILIDAD SOBRE CUALQUIER REPRESENTACIÓN ORAL, ESCRITA O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

NO APLICABILIDAD DE LA GARANTÍA

Además de cualquier otra limitación de la garantía anteriormente comentada, la garantía vencerá y perderá vigencia o efecto si ocurriera cualquiera de las siguientes cosas:

- (i) La causa del daño al Producto se debe a la manipulación o el uso incorrectos.
- (ii) La apertura del motor de la bomba, las modificaciones, la autorreparación o el uso de un modo no incluido en las instrucciones en este manual anulan la garantía.
- (iii) El Usuario individual no mantiene correctamente el Producto, según lo determina Ameda.
- (iv) Se usan repuestos o accesorios no aprobados por Ameda con el Producto, según lo determina Ameda.

Si ocurriera cualquiera de lo anteriormente descrito, Ameda no será responsable del daño del Producto, de sus piezas ni de lesiones que surjan de ello, ya sea directa o indirectamente. Los términos de la garantía establecida previamente sustituyen a todas las garantías previas respecto al Producto comprado, ya sea por escrito o por otro medio.

Fuera de los Estados Unidos: Llame a su distribuidor local, o bien donde compró el producto. Para obtener una lista de distribuidores en su país, visite www.ameda.com.

12. DATOS TÉCNICOS

12.1 Especificaciones

Descripción del producto	Extractor de leche eléctrico
Modelo	Ameda Mya Joy
Succión	Modo de estimulación: -40~-170 mmHg aprox.
	Modo de extracción: -50~-250 mmHg aprox.
Niveles de vacío	Modo de estimulación: 6 niveles
	Modo de extracción: 12 niveles
Ciclos/minuto	Modo de estimulación: 80~120 ciclos/min
	Modo de extracción: 20~65 ciclos/min
Tamaños de copa	25 mm
Fuente de alimentación	Adaptador de CA médico - Salida: 6,0 VCC, 1000 mA Entrada: 100-240 VCA 50/60 Hz
	Cuatro pilas AA, 1,5 V alcalinas (NO INCLUIDAS)
Duración de la batería	1,5 horas aproximadamente. La duración de la batería puede depender del tipo de pila utilizado.
Función adicional	Apagado automático después de 45 min
Peso de la unidad	232,6 g aprox. (8,2 oz) (sin pilas) 328,4 g aprox. (11,6 oz) (con pilas)
Medidas de la unidad	110 x 93 x 55 mm (La x An x Al)
Condiciones ambientales para el uso	Temperatura: 5 °C~40 °C (41 °F~104 °F)
	Humedad: 15~93 % HR
	Presión: 70 kPa~106 kPa
Condiciones de almacenamiento Transporte	Temperatura: -20 °C~55 °C (-4 °F~131 °F)
	Humedad: ≤93 % HR
Duración de servicio prevista	El dispositivo se ha diseñado y desarrollado con el mayor cuidado posible y se prevé una vida útil de 400 horas.
Clasificación de protección de entrada	IP22
Clasificación	Equipo con alimentación interna, tipo BF
Clase de protección	Clase II/Aislamiento doble

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

12.2 Compatibilidad electromagnética

TABLA 1:

Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas		
Este dispositivo está destinado al uso en el entorno electromagnético detallado a continuación. El cliente o usuario del equipo debe asegurarse de que este sea utilizado en dicho entorno.		
Prueba de emisiones	Cumplimiento	Pautas ambientales electromagnéticas
Emisión radiada CISPR 11	Grupo 1, clase B	El dispositivo solamente utiliza energía de RF para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que provoquen interferencia alguna en los equipos electrónicos cercanos.
Emisión conducida CISPR 11	Grupo 1, clase B	El equipo puede ser utilizado en todos los ámbitos, inclusive en ámbitos domésticos y en aquellos conectados directamente a la red pública de baja tensión que alimenta a los edificios destinados a vivienda.
Emisiones de armónicos CEI 61000-3-2	Clase A	
Emisiones de fluctuaciones y parpadeos de tensión (flicker) CEI 61000-3-3	Cumple	

TABLA 2:

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética (Para entornos de atención sanitaria doméstica)			
Este dispositivo está destinado al uso en el entorno electromagnético detallado a continuación. El cliente o usuario del equipo debe asegurarse de que este sea utilizado en dicho entorno.			
Ensayo de inmunidad	Nivel de ensayo CEI 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético - Guía
Descarga electrostática (ESD) CEI 61000-4-2	± 8 kV (contacto) ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV (aire)	± 8 kV (contacto) ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV (aire)	Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica. Si los suelos están revestidos de material sintético, la humedad relativa debe ser por lo menos del 30 %.
Transitorios electrostáticos rápidos/ en ráfagas CEI 61000-4-4	± 2 kV, 100 kHz, parra puerto de corriente CA	± 2 kV, 100 kHz, parra puerto de corriente CA	La calidad de la corriente suministrada por la red de distribución de energía eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Sobretensión CEI 61000-4-5	$\pm 0,5$ kV, ± 1 kV (modo diferencial)	$\pm 0,5$ kV, ± 1 kV (modo diferencial)	La calidad de la corriente suministrada por la red de distribución de energía eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de alimentación CEI 61000-4-11	0 % Ut; 0,5 ciclos A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315° 0 % Ut; 1 ciclo y 70 % Ut; 25/30 ciclos, fase única: a 0° 0 % Ut; 250/300 ciclos	0 % Ut; 0,5 ciclos A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315° 0 % Ut; 1 ciclo y 70 % Ut; 25/30 ciclos, fase única: a 0° 0 % Ut; 250/300 ciclos	La calidad de la corriente suministrada por la red de distribución de energía eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Campo magnético de frecuencia eléctrica (50/60 Hz) CEI 61000-4-8	30 A/m; 50 Hz o 60 Hz	30 A/m; 50 Hz o 60 Hz	Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica deben tener los niveles característicos de un punto típico en un entorno comercial u hospitalario típico.

TABLA 3:


Guía y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética (Para entornos de atención sanitaria doméstica)			
Este dispositivo está destinado al uso en el entorno electromagnético detallado a continuación. El cliente o usuario del equipo debe asegurarse de que este sea utilizado en dicho entorno.			
Ensayo de inmunidad	Nivel de ensayo CEI 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético – Guía
RF conducida RF CEI 61000-4-6	3 V para 0,15-80 MHz; 6 V en bandas ISM y de radioaficionados entre 0,15 y 80 MHz	3 V para 0,15-80 MHz; 6 V en bandas ISM y de radioaficionados entre 0,15 y 80 MHz	Los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles no deben utilizarse más próximos a ninguna parte del equipo (incluidos los cables) que la distancia de separación recomendada, calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
RF radiada CEI 61000-4-3	385 MHz, 27 V/m	385 MHz, 27 V/m	<p>Distancia de separación recomendada De 80 MHz a 800 MHz De 800 MHz a 2,7 Ghz donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor, y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).</p> <p>Las intensidades de campo de transmisores fijos de RF, determinadas según un control electromagnético del lugar, deben ser menores que el nivel de conformidad en cada gama de frecuencias.</p> <p>Puede haber interferencias cerca de equipos marcados con el siguiente símbolo:</p> 
	450 MHz, 28 V/m	450 MHz, 28 V/m	
	710 MHz, 745 MHz, 780 MHz 9 V/m	710 MHz, 745 HZ, 780 MHz 9 V/m	
	810 MHz, 870 MHz, 930 MHz 28 V/m	810 MHz, 870 HZ, 930 MHz 28 V/m	
	1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz 28 V/m	20 MHz, 1845 HZ, 1970 MHz 28 V/m	
	2450 MHz, 28 V/m	2450 MHz, 28 V/m	
5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz 9 V/m	5240 MHz, 5500 HZ, 5785 MHz 9 V/m		

TABLA 4:

Distancias recomendadas entre el equipo y los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles (para entornos de atención sanitaria doméstica)		
Este dispositivo está destinado al uso en un entorno electromagnético en el cual las perturbaciones por emisiones de RF radiada estén bajo control. El cliente o el usuario del equipo puede contribuir a que no ocurran interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre el equipo y los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles (transmisores), según lo recomendado a continuación de acuerdo con la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.		
Potencia nominal máxima de salida del transmisor (W)	Distancia según la frecuencia del transmisor (m)	
	De 80 MHz a 800 MHz $d = \left\lceil \frac{3,5}{E_1} \sqrt{P} \right\rceil$	De 800 MHz a 2,7 GHz $d = \left\lceil \frac{7}{E_1} \sqrt{P} \right\rceil$
0,01	0,12	0,23
0,1	0,38	0,73
1	1,2	2,3
10	3,8	7,3
100	12	23

En el caso de los transmisores cuya potencia nominal máxima de salida no figura en la lista anterior, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede determinarse por medio de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W), según lo declarado por su fabricante.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz la distancia de separación aplicable es la utilizada para la gama de frecuencias más alta.

NOTA 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La absorción y la reflexión provocadas por estructuras, objetos y personas afectan la propagación electromagnética.

12.3 Eliminación del producto

Este producto contiene equipos eléctricos y electrónicos.




1. Los componentes internos de este producto pueden contener materiales peligrosos. Deseche este producto de acuerdo con los sistemas y reglamentos de administración de residuos locales o regionales. Precaución: Los materiales peligrosos presentes en los equipos eléctricos y electrónicos pueden dañar la salud humana y el medio ambiente si el equipo no se desecha correctamente.
2. No deseche equipos eléctricos o electrónicos junto con los residuos municipales sin clasificar.
3. Para obtener más información sobre el comportamiento medioambiental de este producto, visite nuestro sitio web www.ameda.com. La bomba para pechos y las piezas están fabricadas con plásticos que, cuando se desechan, tienen un impacto en el medio ambiente. Recicle de acuerdo con los reglamentos locales.

13. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y GUARDADO



Condiciones de funcionamiento

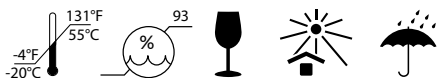

Condiciones de transporte/guardado

14. VIAJES O USO EN OTROS PAÍSES



ADVERTENCIA: Utilice **ÚNICAMENTE** el adaptador de corriente alterna recomendado para el sacaleche Ameda Mya Joy. Los adaptadores de corriente alterna con tomas eléctricas para Australia, Reino Unido, Europa u otros países no están previstos para el uso en Norteamérica.

Si va a viajar fuera del país donde compró la bomba de extracción Ameda Mya Joy, deberá usar baterías o un adaptador de corriente alterna Ameda Mya Joy específico del sector donde se dirige a fin de usar la bomba de extracción mientras viaja.



ADVERTENCIA: Podría causar graves daños personales o al sacaleche.

15. REPUESTOS Y ACCESORIOS AMEDA

ALGUNOS EXTRACTORES TAMBIÉN PUEDEN INCLUIR ALGUNOS DE ESTOS ACCESORIOS:

También puede solicitar estos accesorios adicionales o piezas de repuesto por Internet, en una tienda minorista local de Ameda o a un proveedor cubierto por el seguro de Ameda. Visite www.ameda.com para obtener más información.



Bolso modelo
Dottie



Bolso modelo
Minnie



Adaptador
de CA



Bolso de almacenamiento
de leche Cool'N Carry



Elemento de
refrigeración



Biberones de
almacenamiento
de leche materna



Bolsas de
almacenamiento de
6 oz Pump'N Protect



Bomba para
pechos para
una mano



Portabiberones



Estimulador de areola
Flexishield™ de 21.0 mm



Embudo
para pechos
de 25.0 mm



Embudo
para pechos
de 28.5 mm



Inserto de
28.5 mm/Embudo
para pechos
de 30.5 mm



Embudo para
pechos
de 32.5/36.0 mm



Válvula



Diafragma



Tubo



Adaptador
para tubos



Tapa
adaptadora



Anillo de
bloqueo



Disco
de bloqueo




Para registrar su bomba:

visite [ameda.com/register-your-pump](https://www.ameda.com/register-your-pump) e ingrese el número de serie (SN) de la parte inferior de su bomba.

Distributed in USA by:
Distribué aux États-Unis par :
Distribuido en los EE. UU. por:
Ameda, Inc.
485 Half Day Road
Buffalo Grove, IL 60089
1.866.992.6332

Distribución en otros países: para obtener información o comentarios del producto, comuníquese con su distribuidor local o con las instalaciones donde compró el producto. Para obtener una lista de distribuidores en su país, visite www.ameda.com.

 Distributed by:
Ameda Inc.
485 Half Day Road
Suite 320
Buffalo Grove, IL 60089